

Sådan påsættes INSET® 30

1. Fjern beskyttelsespapiret



2. Åbn hylsteret



3. Tommel og pegefinger placeres på rifterne i siden. Tag fat i ringen inde i den bagerste del af inserteren og træk udad/bagud til den går imod.



4. Plastrets beskyttelsespapir består af 3 dele. Den midterste del fjernes ved at trykke plastpladen bagud, se billedet. Resten af beskyttelsespapiret fjernes først efter at infusionssættet er påført.



5. a) Placér inserterens meder mod huden.
b) Cirklene på inserterens under- og overside presses imod hinanden og infusionssættet skydes på plads.
c) Sæt en finger på den del af plastret som er fæstnet til huden, ved det lille inspektionsvindue.
d) Behold samme vinkel og træk hele inserteren med indføringsnålen fra kroppen.



6. Hold stadig fingeren på det lille inspektionsvindue oven på kanylen ved de følgende punkter a og b.
a) Stræk dig, så mindskes risikoen for at det strammer ved plastret.
b) Fjern beskyttelsespapiret under kanylehuset.
c) Tag derefter beskyttelsepapiret længst fremme af. Klem hele plastret fast rundt om kanylen.
d) Sæt slangen på, lyt efter "kliklyden".



7. Fyld nålen med 0,7 enheder insulin.

Se instruktionsfilm på vores hjemmeside
www.rubinmedical.dk