


# Menu oversigt Tandem t:slim X2 Basal-IQ™-teknologi

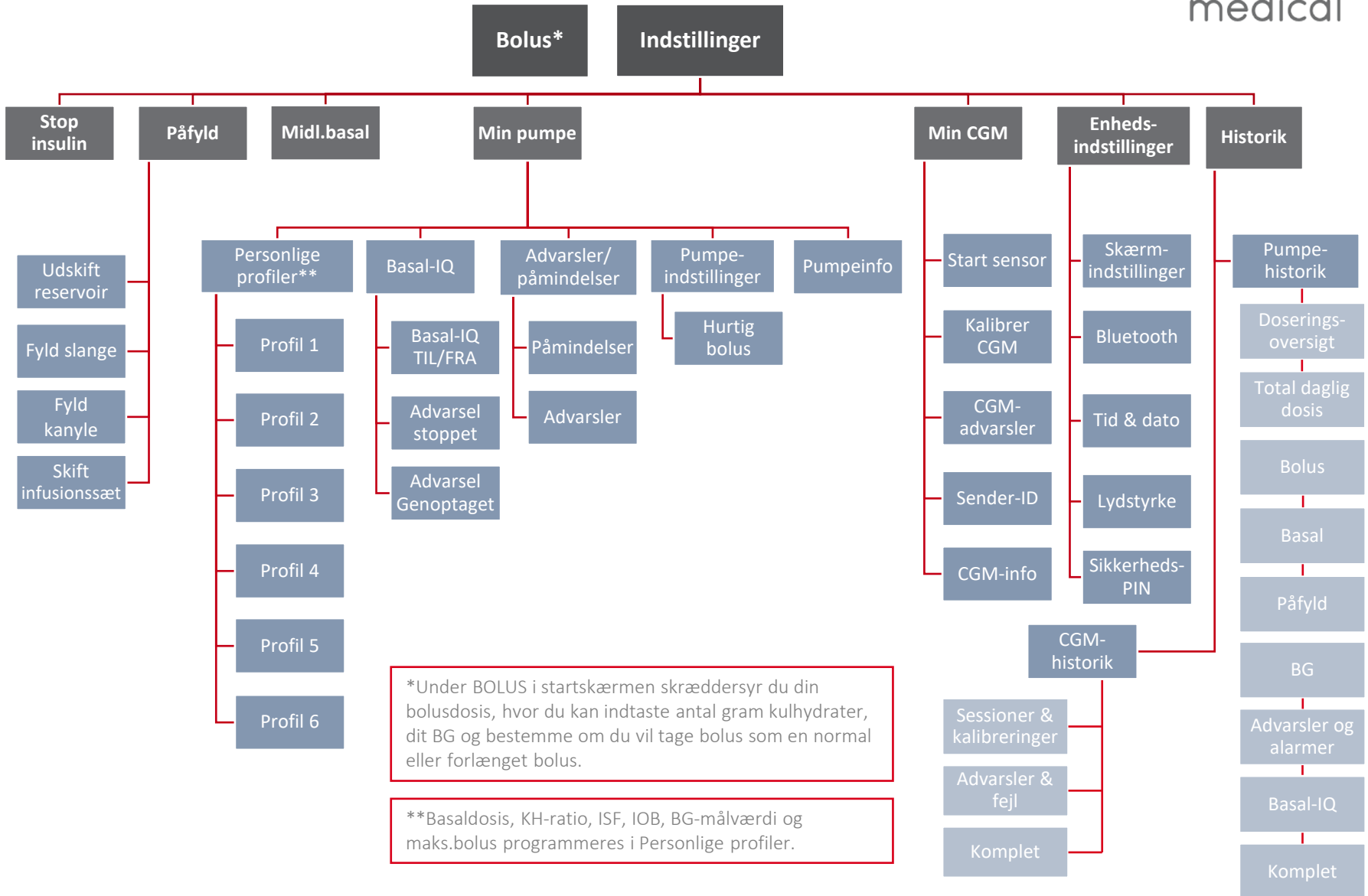

# Basal-IQ™-teknologi


## Insulindoseringen pauseres HVIS:

- Sensorværdien forventes at falde til under 4,4 mmol/l indenfor 30 minutter  
*eller*
- Sensorværdien er 3,9 mmol/l eller lavere (lige nu)

## Insulindoseringen genoptages HVIS:

- Sensorværdien stiger
- Sensorværdi mangler i 10 minutter
- Reglerne for at pausere ikke længere er til stede
- Brugeren genoptager selv doseringen
- Doseringen har været pauseret i 2 timer over en 2,5 timers tidsperiode

\* At genoptage doseringen er altid prioriteret

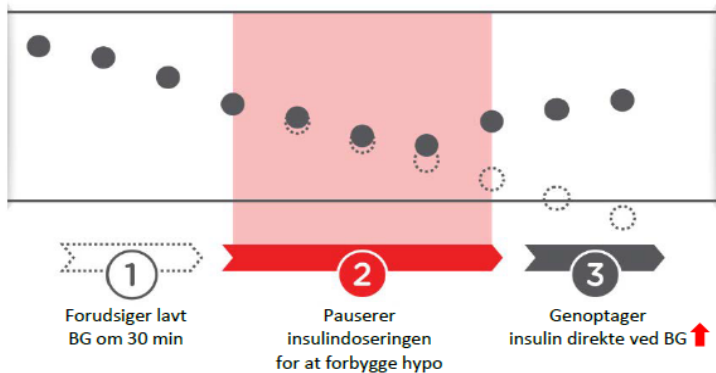

## Ved hvilket scenarie kan insulindoseringen forventes at blive sat på pause?

- Ved sensorværdi på 9-10 mmol/l sammen med ↓↓
- Ved sensorværdi på 8-9 mmol/l sammen med ↓
- Ved sensorværdi på 7-8 mmol/l sammen med ↘
- Ved sensorværdien 3,9 mmol/l eller lavere

Diamant ikon  
Nederste del bliver rød  
når doseringen er  
pauseret

"S" ikon ved  
pauseret dosering



Røde streger i CGM-  
vinduet ved pauseret  
insulindosering

Al dosering er stoppet