

Ny softwareopdatering til din Tandem t:slim X2™ insulinpumpe med **Control-IQ-teknologi**

Tandem Diabetes Care udvikler hele tiden softwaren i insulinpumpen for at optimere behandlingen og imødekomme brugernes ønsker.

Den nye softwareopdatering til insulinpumpen Tandem t:slim X2 giver dig endnu bedre brugervenlighed og et tydeligere overblik.

Nye funktioner:

Bolusikoner i CGM-trendgrafen giver dig et endnu bedre overblik. Allerede på pumpens startskærm kan du se dine bolusser og korrektionsbolusser, hvilket gør det nemmere at tage den rigtige behandlingsbeslutning. Tre forskellige bolusikoner anvendes for at vise normal bolus, forlænget bolus og automatisk korrektionsbolus.

Ny fleksibel timerfunktion når du har brug for at stoppe insulin-doseringen manuelt. Du kan nu indstille en alarm på 15 minutter, 30 minutter, 45 minutter eller 60 minutter, hvilket giver dig en større fleksibilitet. Når den valgte tid er gået, vil du få en påmindelse om at genoptage insulin-doseringen.

Når du skal **fylde kanylen**, har pumpen nu et alternativ, som er bedre tilpasset dit infusions sæt. Standardindstillingen er 0,3 enheder, men du kan nu også vælge 0,5 enheder og 0,7 enheder, afhængigt af, hvilket infusions sæt du bruger. Det gør udskiftning af infusions sæt enklere. Du kan stadig angive en anden værdi, hvis det skulle være nødvendigt.


For at du kun får alarmer, når det virkelig er nødvendigt, er **alarmen "Control-IQ Høj" blevet justeret**. Nu gentages den hver 2. time, så længe forudsætningerne for alarmen fortsat er til stede, eller hvis forudsætningen igen er aktuel.

Hvis **Motionsprofilen** og **Søvnskemaet** overlapper hinanden i tidsindstillingerne, vil pumpen automatisk gå over til Søvnskema, når du deaktiverer Motionsprofilen. Smart og funktionelt hvis du bruger Motionsprofilen sent om aftenen.


Bolusikoner i CGM grafen



Normal bolus

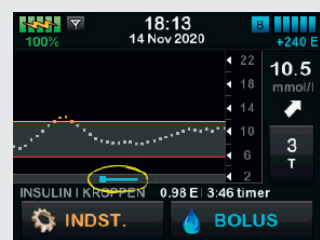


Forlænget bolus

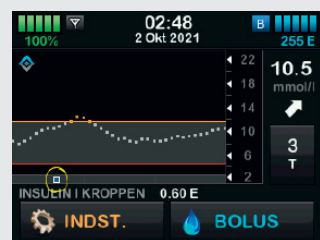

Automatisk korrektionsbolus

Timerfunktion når pumpen stoppes manuelt

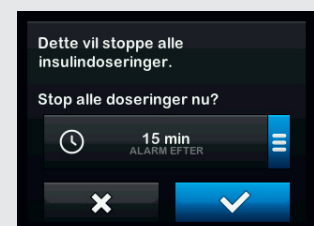

Forudindstillinger for "fyld kanylen"



Gælder software version 7.6