

Forlænget bolus

Tandem t:slim X2 insulinpumpe

Denne kvik-guide med instruktionerne nedenfor er et referenceværktøj til behandlere, der allerede er bekendt med brugen af en insulinpumpe og med insulinbehandling generelt. Bemærk, at ikke alle skærbilleder vises. For mere detaljerede oplysninger henvises til Tandem t:slim X2™ brugermanual.

For at lave en forlænget bolus, skal man gennemgå trin 1–5, som en standard bolus, indtil dette skærbillede:



Tryk på **FORLÆNGET** for at vælge forlænget dosering. Klik på for at fortsætte.



Tryk på **DOSER NU** og/eller **VARIGHED**, hvis der ønskes ændringer. Bekræft med

I dette eksempel vil 50 % af bolusdosis blive doseret nu og de resterende 50 % vil blive doseret jævnt over de næste 2 timer.



Bekræft valget med

I dette eksempel vil bolusdosis blive fordelt med 100 % jævnt fordelt over 50 min.




Bekræft valget med



Pumpen vil altid give insulinet til evt. korrektion nu og fordele den beregnede dosis til kulhydrater efter eget valg. Tryk på for at starte bolusdoseringen.



Når du ser "splash-symbolet" er doseringen startet.

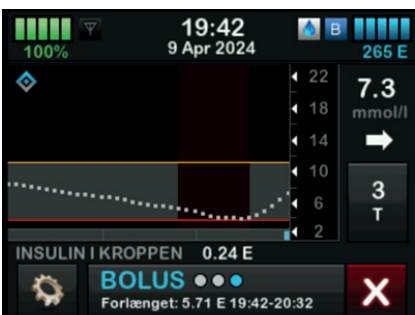

Den blå dråbe øverst i højre hjørne viser bolus bliver indgivet. Trykkes på det hvide kryds kan bolus afbrydes manuelt.

Der kan kun gives en forlænget bolus ad gangen, men der kan suppleres med en standardbolus.

Når den første del af den forlængede bolus (Standard + Korrektion) er givet og der nederst på startskærmen står **Forlænget X ie**, kan der doseres en standardbolus. Dette gøres ved at trykke på **BOLUS** og gennemgå tidligere vist procedure.



Dosering af en forlænget bolus vises med en blå firkant med en streg i feltet under sensorskærmen.