

Bolus

Tandem t:slim X2


Denne kvik-guide med instruktionerne nedenfor er et referenceværktøj til behandlere, der allerede er bekendt med brugen af en insulinpumpe og med insulinbehandling generelt. Bemærk, at ikke alle skærbilleder vises. For mere detaljerede oplysninger henvises til Tandem t:slim X2™ brugermanual.



Tryk **BOLUS** på hovedskærmen. Hvis sensorværdien er over BG-målet, tilbydes at vælge, om der ønskes at tilføje korrektionsbolus. Tryk for at acceptere, Tryk **X** hvis ikke.



Klik på **0 gram** for at indtaste mængden af kulhydrat.

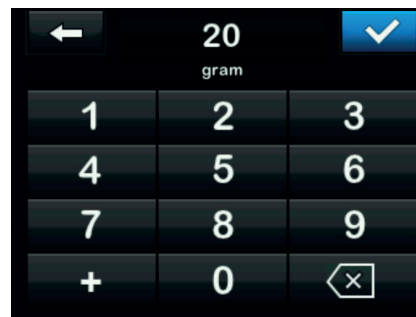

Indtast mængde KH. Sørg for, at "gram" vises over tastaturet.



Tryk på for at bekræfte mængden af insulin.



Bekræft forslaget ved at trykke på .



Tryk på for at starte bolusdoseringen. (Ønskes forlænget bolus – se vejledning).



Når du ser "splash-symbolet" er doseringen startet.



Den blå dråbe øverst i højre hjørne viser bolus bliver indgivet. Trykkes på det hvide kryds kan bolus afbrydes manuelt.



Man kan efterfølgende se en blå firkant under sensorskærmen, der markerer, hvornår der er givet en bolus.