

Sådan applicerer du AutoSoft 90



AutoSoft™ 90 er et infusionssæt med blødt silikonekateter.

OBS! Vælg et indstikssted, som din behandler har anbefalet. Vælg et område lidt væk fra det sidst anvendte indstikssted. Rengør huden efter din behandlers anbefalinger. Sørg for at området er rent og tørt, inden AutoSoft 90 appliceres. Husk at vaske hænder inden du anvender AutoSoft 90.



Træk i det røde bånd for at fjerne forseglingen og åbne dit AutoSoft 90 infusionssæt. Fjern det sterile papir på bagsiden af infusionssættet. **BRUG IKKE** infusionssættet, hvis forseglingen eller det sterile papir er brudt.



Tryk hårdt på de tre forhøjede punkter på hver side af låget med den ene hånd, og løft ud med den anden hånd. **VÆR FORSIGTIG**, så du ikke bøjer eller berører indføringsnålen.




Klik slangen løs fra det sted, den er fæstnet til applikatoren, og **VIKL** forsigtigt slangen ud af rillen.

VIGTIGT: Træk ikke for hårdt. Infusionssættet kan derved risikere at løsne sig fra applikatoren.



Tilslut slangen til reservoires t:lock-kobling. Drej med uret indtil du møder modstand, drej herefter en kvart omgang til for at sikre, at den er korrekt tilsluttet.

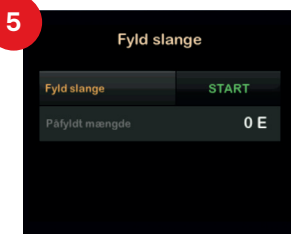

Fyld slangen med insulin i henhold til insulinpumpens brugsanvisning.

Infusionssættet **MÅ IKKE** være tilsluttet kroppen, mens slangen fyldes



Når du starter med at fylde slangen, sørg for at t:lock koblingen peger lige op i luften. Sørg for, at der ikke er luftbobler i tilslutningskoblingen eller slangen.



Hold nålen nedad mens slangen fyldes. De omtrentlige fyldningsmængder er 10-15 enheder for 60 cm slange og 20-25 enheder for 110 cm slange. Stop, når der er kommet 3 dråber insulin fra nålen.



Træk forsigtigt beskyttelsespapiret af. **TRÆK IKKE** for hårdt i papiret. Kanylehuset risikerer derved at løsne sig fra applikatoren.




SÆT IKKE slangen fast i rillen inden du lader applikatoren. Applikatoren lades ved at placere fingrene på de rillede linjer og trække udad, indtil der høres et "klik".



VRID FORSIGTIGT nålebeskytteren af. Kontrollér at kanylehuset stadig sidder fast i applikatoren.



Fastgør slangen i den rille, der er tættest på.

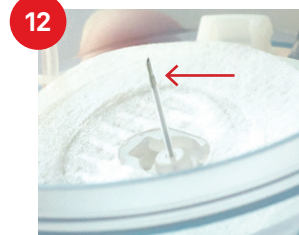

KONTROLLER at du ser stålindføringsnålen stikke ud af den bløde kanyle, inden du applicerer.



Placer applikatoren på indstiksstedet. Udløs applikatoren ved at trykke samtidigt på de runde fordybninger på hver side af applikatoren. Trekanten inden i applikatoren peger i den retning, som slangen vil vende.



Tryk forsigtigt midt på applikatoren for at sikre, at den klæber til huden. Du kan slippe applikatorens sider, når du gør dette.



Fjern applikatoren ved at gribe fat midt på og forsigtigt trække den udad. Hold kun i den hvide del i midten. Når applikatoren er fjernes, massér forsigtigt tapen fast på huden.



Fyld kanylen med følgende mængde insulin:

U-100 INSULIN:

6 mm: 0,3 enheder

9 mm: 0,5 enheder

KONTROLLER ALTID blodsukkeret 1-2 timer efter applicering for at sikre, at infusionssettet fungerer, som det skal.

Sådan kobler du fra og til



Placer din finger foran kanylens dæksel, klem forsigtigt på siderne af infusionssettet og træk forsigtig tilslutningsnålen lige ud.



Hold fast i tilslutningsnålen og før den ind i kanylehuset. Du skal kunne høre et "klik".



Scan koden og se filmen om, hvordan du applicerer infusionssettet AutoSoft™ 90.

Dette materiale er en forkortet version hentet fra AutoSoft™ 90 brugsanvisning. Se venligst brugsanvisningen for komplet information.