

Sikkerhedskontrol og insulinpumpesystemet Tandem t:slim X2 og Dexcom CGM

Når du rejser med dit insulinpumpesystem, er det vigtigt at være forberedt ved sikkerhedskontrollen i lufthavnen:

- Informér sikkerhedspersonalet om, at du bærer insulinpumpen Tandem t:slim X2™ og Dexcom CGM.
- Udsæt **ikke** systemet for røntgen, som bruges til håndbagage og indtjekket bagage.
- Du kan bære insulinpumpen og sensoren, når du går gennem en almindelig metaldetektor.
- Der findes helkropsscannere i lufthavne, som anvender en form for røntgen – dit system bør **ikke** udsættes for disse. Anmod om manuel inspektion af din insulinpumpe og sensorer.
- Husk at medbringe en lægeerklæring og ekstra forbrugsartikler i håndbagagen for at sikre en problemfri og sikker rejse.

Er det sikkert at flyve med Tandem t:slim X2 insulinpumpe?

Ja, insulinpumpen Tandem t:slim X2™ er testet og godkendt til sikker brug ombord på kommercielle fly. Tandem t:slim X2 doserer insulin via Micro-Delivery™-teknologi, hvilket betyder, at insulin-doseringen ikke påvirkes af ændringer i lufttrykket. Micro-Delivery-teknologien reducerer risikoen for utilsigtet insulindosering og muliggør meget præcise insulindoser.



Scan QR-koden og download et informationsblad, du kan vise til lufthavnspersonalet, hvis der opstår spørgsmål omkring dine hjælpemidler.

Dette produkt er måske ikke det rette for dig. Læs og følg altid instruktionerne i brugervejledningen. Insulinpumpen Tandem t:slim X2 er godkendt til brug af personer med type 1-diabetes, fra 6 år og opefter. Besøg tandemdiabetescare.com/safetyinfo for yderligere vigtig sikkerhedsinformation.

© 2025 Rubin Medical ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Tandem Diabetes Care er et registreret varemærke og t:slim X2™ og Micro-Delivery™ er varemærker tilhørende Tandem Diabetes Care Inc. Dexcom er et registreret varemærke, som tilhører Dexcom Inc. i USA og/eller i andre lande.

Følg os på:

facebook.com/rubinmedicaldanmark
instagram.com/rubinmedicaldanmark

Kundesupport på hverdage 08.00-16.00: **70 27 52 20**
Teknisk pumpe-support uden for åbningstid: **70 27 52 20**

www.rubinmedical.dk

