


Status

Tandem t:slim X2

Denne kvik-guide med instruktionerne nedenfor er et referenceværktøj til behandlere, der allerede er bekendt med brugen af en insulinpumpe og med insulinbehandling generelt. Bemærk, at ikke alle skærbilleder vises. For mere detaljerede oplysninger henvises til Tandem t: slim X2 brugermanual.




Klik på symbolet for insulinniveau, som findes øverst oppe til højre.

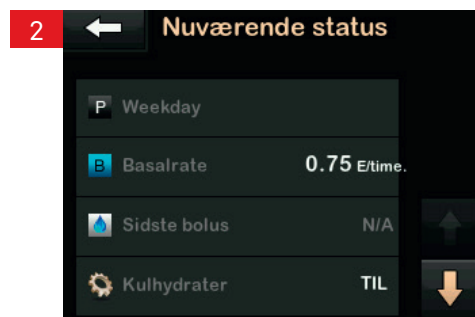

Pumpen viser navnet på aktiv profil, aktuel basalrate, tid og dosis for seneste bolus samt om bolus beregnes med g kulhydrater eller enheder insulin.



Scrol ned ved at klikke på pil ned for at se aktiv ins.føls., kulhydratratio, BG-mål samt IOB.

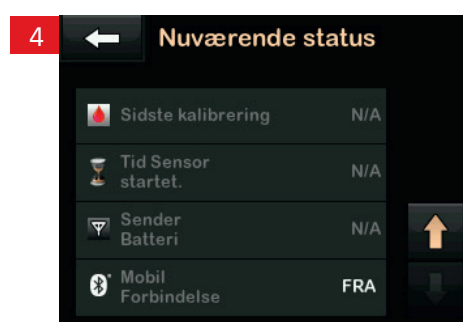

Ved CGM-anvendelse vises seneste kalibrering, start af session, batteristatus for senderen og Bluetooth tilslutning.

FORKLARING AF IKONER

Følgende symboler kan vises i pumpen. De vises i områderne til venstre lige ved batterisymbolet eller til højre ved symbolet ved insulinniveau.

	Strøm tilbage på batteriet		Mængde insulin som resterer i reservoiret
	CGM session er aktiv og senderen kommunikerer med pumpen		En midlertidig basal dosis er aktiv
	CGM session er aktiv men senderen kommunikerer ikke med pumpen		En basal dosis på 0 E/t er aktiv
	CGM kalibrering kræves		En midlertidig basal dosis på 0 E/t er aktiv
	En påmindelse, besked eller alarm er aktiveret		En bolus er i gang med at blive doseret
	Basal dosis er programmeret og doseres		Al insulindosering er stoppet