




Forbind din Tandem-konto til Glooko

At forbinde dine konti er den nemmeste måde, at få fuldt overblik over din diabetes på et og samme sted. Du kan oprette forbindelse på blot et par minutter ved hjælp af enten Glooko Mobile App eller din computer via web-appen.


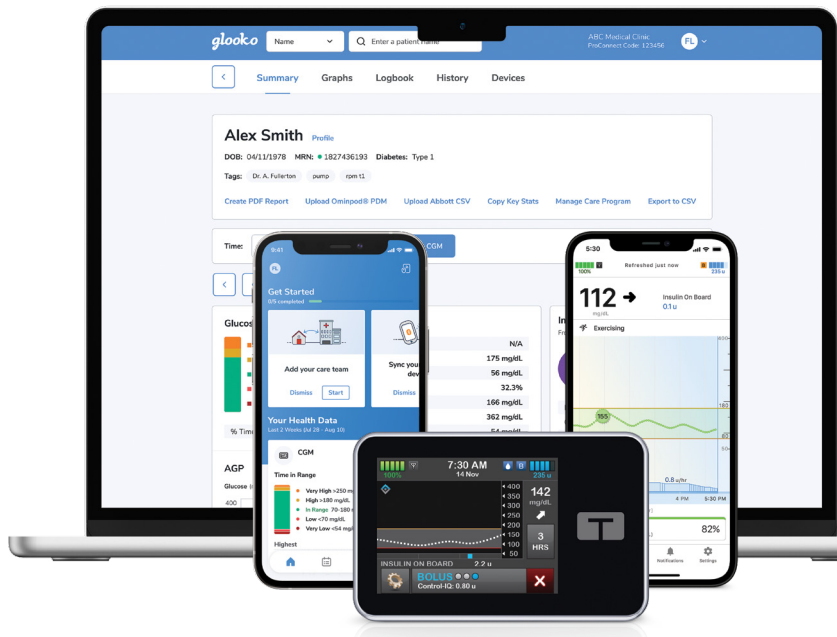


TILSLUTNING VIA GLOOKO MOBILE APP

1. **Start Glooko:** Åbn appen på din smartphone.
2. **Tilføj din enhed:** Tryk på knappen Forbundne enheder øverst til højre, og vælg **Tilføj enhed**.
3. **Vælg din diabeteskonto:** Find og tryk på Tandem Source fra listen, og klik derefter på **Næste**.
4. **Log på:** Du vil blive sendt videre til **Tandem**-portalen. Indtast dine loginoplysninger til din Tandem-konto her.

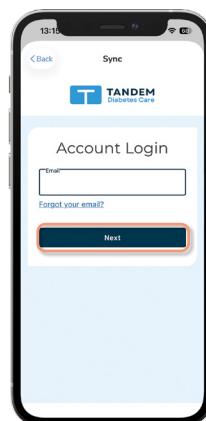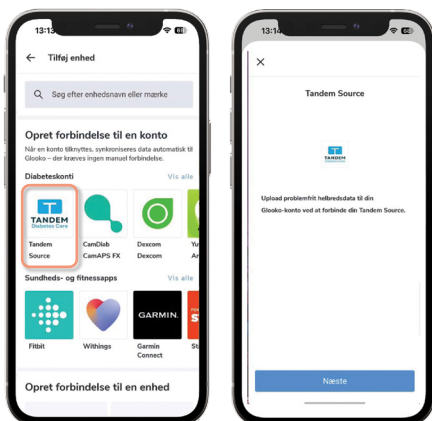


5. På skærmen til kontobekræftelse skal du klikke på **Opret forbindelse** for at tillade datadeling mellem Tandem Source og Glooko.
6. **Så er vi klar!** Der vises en bekræftelsesskærm, der angiver, at dine konti er kædet sammen.

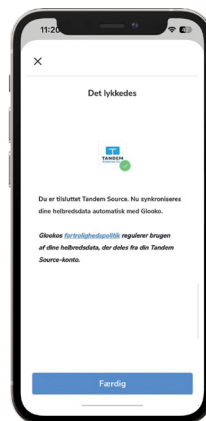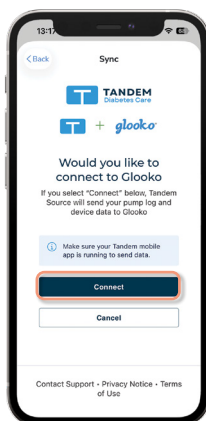


TILSLUTNING VIA GLOOKO WEB APP

1. **Log på:** Gå til my.glooko.com og log på.


2. **Åbn enheder:** Naviger til fanen **Enheder**, og klik på **Tilføj enhed**.

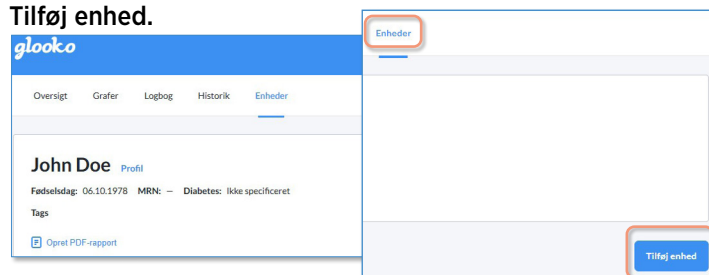


3. **Vælg din diabeteskonto:** Find Tandem Source fra listen, og klik derefter på **Opret forbindelse**.

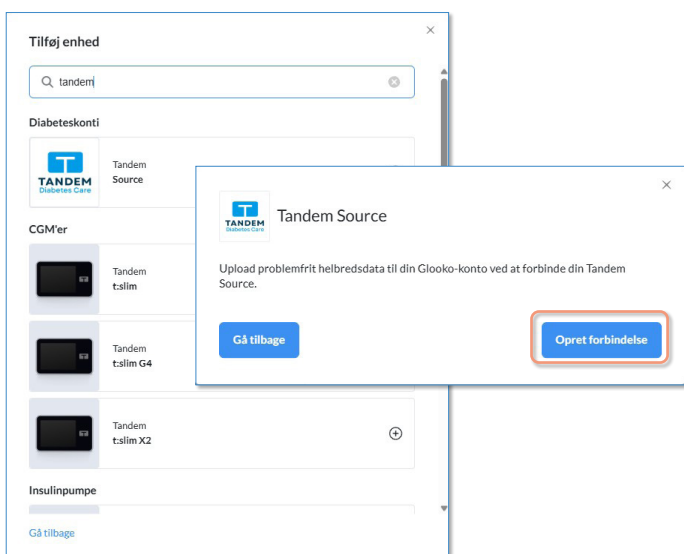


4. **Log på:** Du vil blive omdirigeret til **Tandem**-portalen i et nyt vindue eller en ny fane. Indtast dine loginoplysninger til din Tandem-konto her.

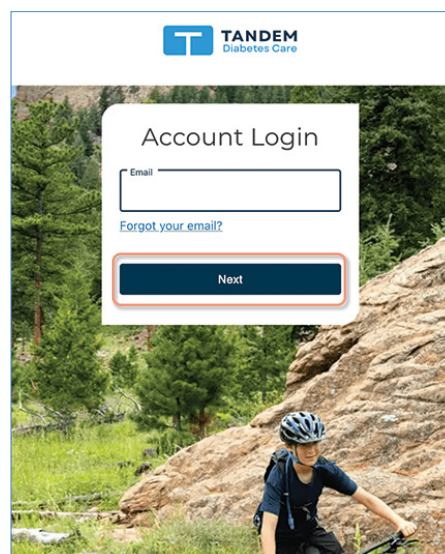

5. På skærmen til kontobekræftelse skal du klikke på **Opret forbindelse** for at tillade datadeling mellem Tandem Source og Glooko.

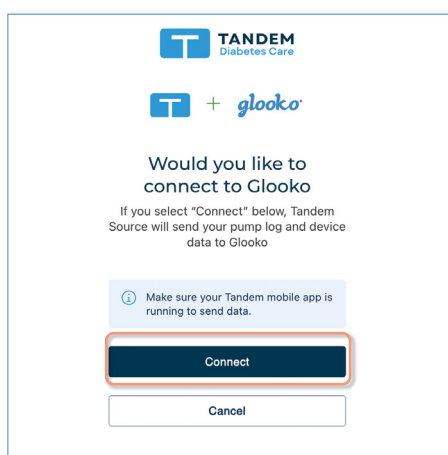

6. **Så er vi klar!** Der vises en bekræftelsesskærm, der angiver, at dine konti er kædet sammen.

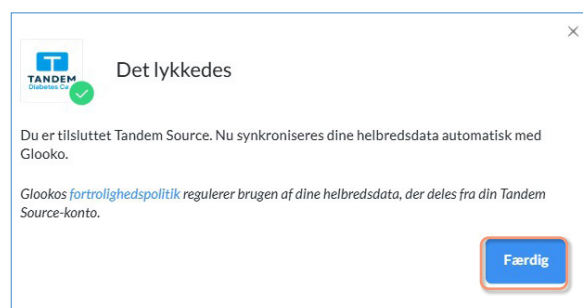

Har du brug for hjælp? Hvis du støder på problemer under tilslutningsprocessen, er vores supportteam klar til at hjælpe på help@glooko.com.

Produkter og kompatibilitet beskrevet i dette dokument er muligvis ikke tilgængelige i alle lande, hvor Glooko driver virksomhed. Alle varemærker og logoer tilhører deres respektive ejere og anvendes med tilladelse. Produktets udseende kan variere i forhold til de viste billeder. Sikkerhedsoplysninger om Tandem: tandemdiabetes.com/safetyinfo